

Produktinformationsblatt

Augenspülflasche inkl. steriler Füllung

Beschreibung

- Augenspülflasche als Erste Hilfe Maßnahme bei einem Unfall mit Chemikalien etc.

Anwendungsgebiete

- Für das menschliche Auge

Anwendung

Verschlusskappe abnehmen, Kopf nach vorn beugen oder notfalls die Flasche über das Auge halten. Augenglieder mit Daumen und Zeigefinger offen halten. Flasche pumpend zusammendrücken.

Nach jedem Augenunfall und jeder erforderlich gewordenen Augenspülung ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Mindesthaltbarkeit

- Im versiegelten Zustand 36 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/1	500ml Flasche	3181



Beispielbild