

Von Profis für Profis



SANIT ErsteHilfe NEU

Gegenmaßnahme gegen kleinere Schnittwunden, Abschürfungen und Alltagsverletzungen.

Pflaster, Gelenkverband, Finger- und Fingerkuppenverband in einem.

Stört nicht und hindert nicht in der Bewegung.

Rutschfest – löst sich nicht von alleine.

SANIT ErsteHilfe

Optimaler Wundverschluss

Gelenkverletzungen



Das Wundkissen nach Größe und Blutung der Verletzung falten.



Das Wundkissen auf die Wunde legen und den Verband mit mittelstarkem Zug auf beiden Seiten des Wundkissens herumwickeln.



Den Verband zum Wundkissen zurückführen. Einfach abreißen und das Ende fest andrücken.



Lieferformen:

| Menge/VE | Inhalt | Artikel-Nr |
|----------|-------------------|------------|
| 1/1 | 2 Rollen je 4,5 m | 3218 |

Kuppenverletzungen



Den Verband ohne Komresse hinter dem ersten Gelenk einmal herumwickeln und in Richtung der Kuppe nach oben wickeln.



Je nach Größe der Wunde ein Wundkissen durch mehrmaliges herumwickeln formen und in Richtung der Wunde umknicken. Einfach zurückwickeln und abreißen.



- ◀ Öl- und fettfest
- ◀ Dauerelastisch
- ◀ Optimaler Wundverschluß
- ◀ Wasserfest und abwaschbar
- ◀ Verklebt nicht auf der Wunde
- ◀ Atmungsaktiv

